

MEDI TRON-ABP 液設置に関する注意点

お取引様 各位

エースバイオプロダクト株式会社

長野県上田市御嶽堂 675-1

電話 0268-41-1771 FAX 0268-41-1772

前略

昨年9月に上市致しました、自動薬液添加器 MEDI TRON を用いた ABP 液の飲水ライン添加時にピッカーメッシュにオリ等の不純物が付着する不具合が発生致しております。

弊社調査では、下記利用法の際に上記問題が発生する可能性が示唆されております。問題と対策をご参照の上、ご利用頂けます様お願い申し上げます。

草々

- ピッカー不具合が起こる可能性のある使用方法 -

問題 1 ABP 液を希釈してご利用される場合

問題 2 ABP 液をポリ容器他移し替えてご利用される場合

問題 3 機器新設時、配管洗浄が不十分な場合

問題 4 粘性の高い薬液を併用される場合

- 対 策 -

問題 1 及び 2 の対策

ABP 液 18L-MEDI TRON セットに付属のコネクターを用い、同液包装容器に直接接続し、原液の状態でご利用ください。

尚 0.2% 以下での添加が必要な場合も添加時間で調節頂く事をお勧めいたします。


設備上の問題等で希釈が必要な場合は 5% クエン酸水溶液を作成して頂き、A B P 液を同液で希釈利用頂けます様お願い申し上げます。

問題 3 の対策

お客様が井戸水をご利用で、且つ、長期的に水道配管のメンテナンスが行われていない場合は ABP 液中に含まれている酸成分が水道配管中の水垢を落とす可能性があります。

従いまして、機器新設時、水道配管中のクエン酸濃度が 0.5% となる様、クエン酸液を展開し、配管洗浄頂けます様お願い申し上げます。

[推奨洗浄様式]

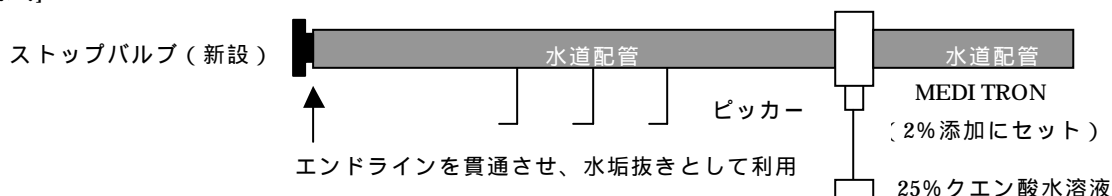

問題 4 の対策

粘性の高い商品との併用を停止頂くか、1 週間に 1 回程度の定期洗浄等でご利用いただけますようお願い致します。

尚、コネクターと ABP 液セットご利用の際も 1 ヶ月に 1 度の配管洗浄の実施、また、夏場 (6 月 ~ 9 月) 等はピーカーのメッシュの状態をご確認頂けましたら ABP 液を快適にご利用頂けることと存じます。

今後は希釈可能な ABP 液並びに、洗浄液 (オプション) の上市予定しておりますので、今後も引き続き、ABP 液をご愛顧賜れましたら幸いに存じます。